

Système de désinfection, de nettoyage, de rinçage et de conservation pour lentilles de contact rigides perméables au gaz.

POUR LENTILLES DE CONTACT SCLÉRALES

Bien se laver les mains avec un savon doux avant de manipuler les lentilles.

1 DÉSINFECTER, NETTOYER ET NEUTRALISER



- Placer un comprimé neutralisant et nettoyant dans la position spécifiée (fente) du corps de l'étui dédié. S'assurer de bien utiliser l'étui dédié à cet effet. ⚠ Le fait de placer le comprimé dans une position autre que celle spécifiée risque d'entraîner une neutralisation infructueuse, ce qui entraînerait une coloration de la lentille de contact.
- Placez les lentilles de contact dans le porte-lentille de l'étui.
- Remplissez avec la solution désinfectante jusqu'à la ligne indiquée.
- Fermez le couvercle du boîtier et laissez reposer pendant au moins quatre heures.
- S'assurer que les lentilles et la solution sont incolores.

2 RINCER LES LENTILLES DE CONTACT

- Retirez les lentilles nettoyées/désinfectées du support. Tenez-les entre vos doigts et rincez les deux côtés avec solution de rinçage pendant au moins 10 secondes.
- ⚠ Utilisez toujours **cleadew CareSolution** pour rincer les lentilles. Évitez d'utiliser des solutions salines ou MPS contenant du chlorure de sodium comme conservateur ou désinfectant.

CONSERVER LES LENTILLES DE CONTACT

- Pour ranger les lentilles de contact, suivre les instructions données par les professionnels de soins oculaires.
- Si vous prévoyez de porter les lentilles de contact qui ont été rangées pendant 24 heures ou plus, il est recommandé de démarrer l'entretien à partir du début avant de les porter.

⚠ PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Afin d'éviter toute infection ou lésion oculaire grave, il est important de suivre les consignes d'utilisation.
- Utilisez toujours ensemble la solution désinfectante et le comprimé neutralisant et nettoyant.
- Refermez bien le flacon après l'utilisation.
- Utilisez toujours les produits **cleadew SL system**, y compris l'étui à lentilles et **cleadew CareSolution**.
- Jeter la solution au bout de 90 jours après l'ouverture du flacon.
- Ne pas utiliser pour les lentilles souples.
- N'utilisez pas **cleadew CareSolution** pour désinfecter ou conserver les lentilles.
- Ne touchez pas l'embout du flacon afin d'éviter toute contamination.
- N'avalez pas la solution ou le comprimé. Le cas échéant, boire de l'eau potable abondamment et immédiatement.
- N'utilisez pas le produit dans les yeux. S'il entre en contact avec les yeux, rincez-les immédiatement avec une solution saline stérile ou avec un liquide de rinçage oculaire.
- N'utilisez pas de comprimé endommagé ou décoloré.
- Ne réutilisez pas la solution. (Après l'entretien des lentilles, la solution est neutralisée et ne peut plus désinfecter d'autres lentilles. Pour éviter toute infection oculaire, ne réutilisez pas la solution.)
- N'utilisez pas le produit après la date d'expiration.
- N'utilisez pas le produit si le flacon ou l'emballage est sale ou abîmé.
- N'utilisez pas la solution si elle est trouble ou décolorée.
- Après la désinfection, le nettoyage et la neutralisation, il ne faut pas porter les lentilles sans les avoir rincées avec **cleadew CareSolution**.
- N'utilisez pas ce produit avec une autre solution, ou un autre comprimé ou médicament.
- N'utilisez pas de l'eau du robinet pour rincer les lentilles ou l'étui à lentilles.
- Conserver hors de la portée des enfants.
- Pour éviter toute contamination bactérienne, ne transférez jamais la solution désinfectante dans un autre récipient, ne la complétez jamais avec de l'eau ou un autre agent médical liquide.
- Afin d'éviter toute contamination, utilisez un nouvel étui à lentilles à chaque achat.
- Utilisez les comprimés directement après ouverture.
- Une fois que la totalité des comprimés neutralisants et nettoyants ont été utilisés, jetez toute solution restante dans le flacon.
- Si la solution entre en contact avec des vêtements, lavez-les immédiatement à l'eau.
- Après chaque utilisation, rincez à l'eau toute solution restante présente dans le lavabo afin d'éviter qu'il ne soit pas taché.
- Conservez les produits dans un endroit sec, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
- En cas de symptômes comme des douleurs ou des irritations aux yeux, retirez les lentilles immédiatement et consultez un ophtalmologiste ou un spécialiste de soins oculaires.
- N'utilisez pas de produit en cas d'allergie à l'un des ingrédients utilisés dans sa composition.
- Ne changez pas de système de nettoyage de lentilles de contact sans consulter un professionnel de la vue.
- Dans le cas peu probable que les lentilles de contact seraient colorées après l'entretien, ne les portez jamais.
- Si vous n'avez plus assez de **cleadew CareSolution**, veuillez en acheter des unités supplémentaires.
- L'acide borique est toxique pour la reproduction et peut réduire la fertilité dans le futur s'il est absorbé par des enfants ou nuire aux bébés s'il est absorbé par des femmes enceintes ou allaitantes. Faire preuve de prudence et éviter l'utilisation directe de la solution dans l'œil ; ne pas avaler. Une utilisation appropriée permettant néanmoins de réduire le risque, ce produit peut être utilisé par les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes. La sensibilité aux produits chimiques diffère d'une personne à l'autre. Pour les personnes sensibles, il est recommandé de rincer les lentilles avec une solution saline stérile ne contenant pas d'acide borique avant de les mettre.

INGRÉDIENTS

[Solution désinfectante] Povidone iodée (0.05%) Acide borique **STERILE A**
 [Comprimé neutralisant et nettoyant] Sulfite de sodium (2.4 mg/comprimé),
 Enzyme protéolytique (8.0 mg/comprimé)
 [Solution de rinçage] Peroxyde d'hydrogène sous forme d'agent conservateur (0,004 %) Acide borique **STERILE A**