


Solution oxydante avec des agents biotechnologiques pour l'élimination en **profondeur des lipides et des protéines**, la décontamination, l'hydratation et la neutralisation, en 2 heures.


MODE D'EMPLOI



**INSERTION
DU
COMPRIMÉ**

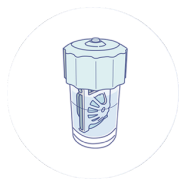

**DÉCONTAMI
NATION
EFFERVESCE
NCE**

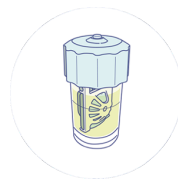

**NEUTRALIS
ATION
PROCESSUS
TERMINÉ**



**FIN
LENTILLES
PRÊTES**

Applications:

Système pour le nettoyage, la décontamination, l'hydratation et l'élimination en profondeur des lipides et des protéines des lentilles de contact souples (y compris en silicone hydrogel) et RPG (y compris ortho-k), sans masser ni rincer et seulement en 2 heures.

Mode d'emploi:

1. Avant de manipuler vos lentilles, lavez, rincez et séchez-vous soigneusement les mains.
2. Placez les lentilles au centre des paniers de l'étui et fermez-le.
3. Remplissez l'étui jusqu'au repère avec la solution décontaminante **Ever Clean Plus**.
4. Ajoutez un comprimé **Ever Clean Plus** dans l'étui qui contient la solution décontaminante.
5. Placez le couvercle et fermez l'étui.
6. Agitez doucement l'étui de haut en bas afin que l'intérieur de l'étui se décontamine.
7. Assurez-vous que le comprimé se trouve dans la solution pour que le processus de nettoyage puisse commencer. Placez l'étui en position verticale et à l'abri de la lumière directe.
8. L'effervescence est immédiate. A l'issue de la neutralisation (2 heures), la solution présente une légère couleur verte. Vos lentilles sont décontaminées, propres, neutralisées et prêtes à l'emploi.
9. Avant d'extraire les lentilles, agitez doucement l'étui.
10. Lavez, rincez et séchez-vous soigneusement les mains avant de manipuler les lentilles.
11. Retirez les lentilles des paniers de l'étui et placez-les directement sur les yeux.
12. Videz l'étui à lentilles et laissez-le sécher à l'air libre.

Précautions d'emploi:

- Avant utilisation, lisez les précautions et le mode d'emploi.
- Ne pas utiliser le produit si le sceau de sécurité est absent ou endommagé.
- Ne jamais mettre en contact direct avec l'œil la solution **Ever Clean Plus** qui n'aurait pas été préalablement neutralisée.
- Utilisez toujours l'étui spécialement conçu pour **Ever Clean Plus**. D'autres étuis ne garantissent pas un bon fonctionnement du produit.
- Si vous constatez que la solution à l'intérieur de l'étui est restée incolore, il est nécessaire de recommencer le processus de décontamination de vos lentilles avant de les utiliser de nouveau.
- **Ever Clean Plus** ne contient pas de conservateurs. Par conséquent, il est déconseillé de laisser les lentilles trempées dans la solution plus de 48 heures. Si vous souhaitez conserver les lentilles plus longtemps, utilisez une solution saline ou une solution multifonction avec des conservateurs.
- Ne jamais utiliser l'eau du robinet pour rincer l'étui à lentilles ou les lentilles.
- Jeter la solution contenue dans l'étui à lentilles après chaque nettoyage des lentilles.
- En cas d'irritation, arrêtez l'utilisation des lentilles et consultez votre médecin/professionnel de la santé visuelle.
- Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants.
- Ne retirez pas les comprimés de leur emballage tant que vous ne les utilisez pas.
- Conserver le flacon bien fermé après utilisation.
- Ne pas utiliser le flacon au-delà de 60 jours après son ouverture.
- Conserver la solution décontaminante et les comprimés à température ambiante, dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe.
- Ne pas utiliser après la date de péremption.
- Ne pas avaler la solution ni les comprimés.
- Tenir le produit hors de la portée des enfants.
- Avant d'utiliser un médicament ophtalmique, informez votre médecin que vous êtes porteur de lentilles de contact.
- Lentilles teintées : dans certains cas, **Ever Clean Plus** peut altérer la couleur des lentilles.

Composition:

Solution de peroxyde d'hydrogène à 3 % et comprimés avec des agents biotechnologiques pour le nettoyage, l'hydratation et la neutralisation