

# HYGIÈNE DES PAUPIÈRES

## En cas de sécrétions persistantes ou d'occlusion d'un canal lacrymal :



Chauffer le sachet fermé pendant quelques minutes dans de l'eau tiède (environ 40°)



Après avoir soigneusement nettoyé vos mains, ouvrir le sachet et retirer la gaze.



Appliquer la gaze comme une compresse chaude, en massant doucement la zone 1 à 2 minutes pour permettre un traitement adéquat.

## En cas d'inflammation :




4°C



Placer le sachet fermé au réfrigérateur au moins une heure avant l'application.



Après avoir soigneusement nettoyé vos mains, ouvrir le sachet et retirer la gaze.

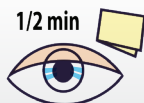

Appliquer la gaze sur l'œil en la maintenant en place quelques minutes comme une compresse froide pour permettre un traitement adéquat.

**Ophtalmic**

[www.ophtalmic-epharma.fr](http://www.ophtalmic-epharma.fr)