

FR - Solution polyvalente contenant du hyaluronate

Nettoyage, élimination des dépôts protéiques, désinfection, rinçage, conservation, pose et humidification. Pour lentilles de contact souples.

Composition :

POLYMÈRE DE DIAMINOURÉE 0,00065 %, COSMOCIL 0,0002 %, HA, BORAX/ACIDE BORIQUE, CHLORURE DE SODIUM, EDTA, POLOXAMÈRE 407, EAU PURIFIÉE.

Précautions d'utilisation et mode d'emploi :

- Lavez-vous et séchez-vous les mains.
- Ne pas utiliser si le capuchon inviolable a été rompu avant la première utilisation.
En dévissant le bouchon du flacon, vous entraînerez la rupture du capuchon inviolable.
- Retirez la lentille de votre œil, placez la lentille dans la paume de votre main et déposez-y quelques gouttes de solution pour lentilles de contact.
- Massez doucement la lentille entre la paume de votre main et votre doigt pendant 10-15 secondes.
- Rincez soigneusement les lentilles à l'aide de la solution.
- Remplissez votre étui à lentilles de solution pour lentilles de contact, puis placez-y vos lentilles.
- Laissez les lentilles dans leur étui pendant au moins 6 heures.
- Lavez-vous et séchez-vous les mains.
- Retirez la lentille de l'étui et avant de la poser, déposez quelques gouttes de solution fraîche sur la lentille.
- Jetez la solution usagée que contient l'étui. Rincez l'étui avec la solution pour lentilles de contact. Laissez l'étui sécher à l'air libre.
- Nettoyez et désinfectez à nouveau si les lentilles sont restées inutilisées dans la solution pendant plus de 7 jours.
- Ne touchez pas l'embout compte-gouttes du flacon.
- Refermez le flacon après l'utilisation.
- Remplacez fréquemment votre étui à lentilles.

Conditions de conservation :

- À utiliser dans les 3 mois après l'ouverture.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Conserver la solution dans son emballage d'origine.

Mises en garde et contre-indications :

- Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l'un des ingrédients.
- Ne pas utiliser si vous avez une infection des yeux.
- En cas d'irritation des yeux, cessez l'utilisation et consultez un médecin.
- N'utilisez pas ce produit en association avec d'autres médicaments pour les yeux avant d'avoir consulté votre ophtalmologiste ou votre médecin.
- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé (voir figure 1).
- N'utilisez pas la solution après la date de péremption.
- Ne changez pas votre système d'entretien de lentilles de contact sans consulter votre ophtalmologue.
- Ne pas mélanger ou utiliser avec une autre solution pour lentilles de contact, sauf si cela est indiqué dans le mode d'emploi.
- Toujours utiliser une solution fraîche pour lentilles de contact.
- N'utilisez jamais de l'eau du robinet à la place de cette solution pour lentilles de contact.
- Cessez d'utiliser le produit et informez le fabricant légal et les autorités de santé nationales si vous subissez un problème de santé grave en rapport avec ce dispositif médical.