



# Les nouveaux inséparables MENICARE PURE & PROGENT



**Pour prendre soin**  
des lentilles rigides perméables

# MENICARE PURE

La nouvelle solution multifonctions Menicon pour plus de confort au quotidien



**Visser à fond le bouchon à la 1ère utilisation pour percer le flacon**

## Formulation naturelle

- $\epsilon$ -Polylysine.
- Vitamine C glucoside.
- Acide hyaluronique.

## Clean

- Efficacité décontaminante.
- Pouvoir nettoyant<sup>(2)</sup>.

## Pure


- Double filtration stérilisante.
- Tolérance accrue.

## Indications

- Nettoyage.
- Décontamination : efficace sur les bactéries et les champignons dès 30 minutes<sup>(3)</sup> et actif sur les amibes (trophozoites) en 4 heures<sup>(1)</sup>.
- Conservation.
- Rinçage.

## Composition

- $\epsilon$ -Polylysine 0.01 %.
- Edétate de disodium 0.05 %.
- HCO-60 0.10 %.

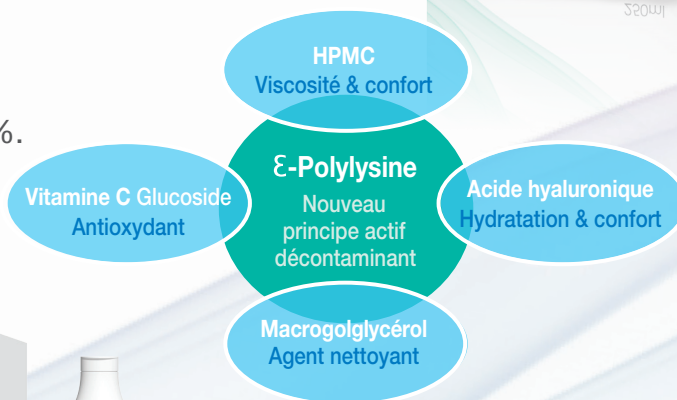

MENICARE PURE 250 ml + Etui



MENICARE PURE 70 ml + Etui & PROGENT (1 dose A + 1 dose B) + Etui PROGENT Echantillon gratuit



MENICARE PURE 250 ml

Kit départ MENICARE PURE & PROGENT

# PROGENT

Le réflexe hebdomadaire pour garantir une parfaite qualité de surface des lentilles



## Comment utiliser PROGENT

- Mélanger une dose A et une dose B dans l'étui PROGENT.
- Laisser tremper les lentilles **30 minutes** (au delà de 30 minutes il existe un risque de décoloration des lentilles).
- Rincer abondamment les lentilles pendant au moins 15 secondes avec la solution MENICARE PURE.

PROGENT A : NaClO libérant ClO<sup>-</sup> + PROGENT B : KBr



L'hypobromite dégagé détruit les chaînes protéiques en 30 minutes.

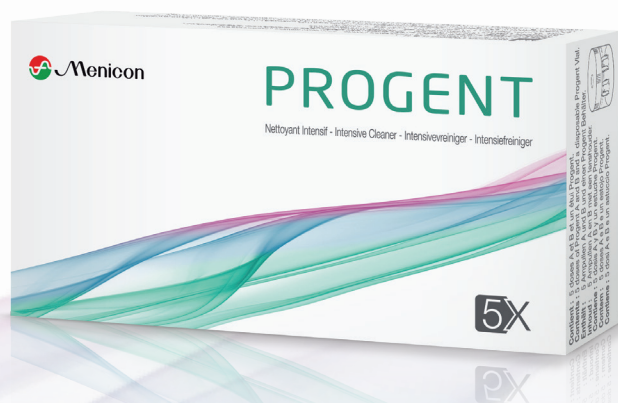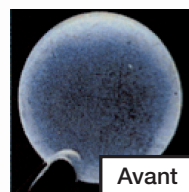

## Indications

- Déprotéinisation.
- Nettoyage intensif.
- Décontamination :  
Activité désinfectante en seulement 5 minutes sur les bactéries, champignons, virus et amibes<sup>(4, 5, 6, 7, 8)</sup>.  
+ Action d'élimination des prions<sup>(9)</sup>.

## Composition

- Dose A : Solution d'hypochlorite de sodium (NaClO 20,30 mg - eau purifiée q.s.p 5 ml).
- Dose B : Solution de bromure de potassium (KBr 30,75 mg - eau purifiée q.s.p 5 ml).

MENICARE PURE 250 ml  
+ Etui  
& PROGENT  
(5 doses A + 5 doses B)  
+ Etui PROGENT



MENICARE PURE  
2 x 70 ml + Etui  
& PROGENT  
(2 doses A + 2 doses B)  
+ Etui PROGENT



Pack 1 + 1 MENICARE PURE & PROGENT

Travel kit MENICARE PURE & PROGENT