

# AVIZOR

# Unica<sup>®</sup> sensitive

WITH  
hyaluronic acid

for sensitive eyes

**f**  
SOLUTION TOUT-EN-UN POUR UTILISATEURS AYANT DES YEUX SENSIBLES. POUR TOUS TYPES DE LENTILLES DE CONTACT SOUPLES (y compris les nouvelles générations de lentilles hydrogel-silicone)

UNICA SENSITIVE a été spécialement formulée pour proportionner un confort extra aux utilisateurs de lentilles plus sensibles.

Fonctions: Nettoie et élimine les protéines, décontamine, conserve, rince, hydrate et lubrifie.

#### MODE D'EMPLOI:

1. Avant de manipuler les lentilles de contact, se laver soigneusement les mains.
2. Retirer la lentille et la déposer sur la paume de la main. Frotter pendant quelques secondes les deux faces de la lentille avec quelques gouttes de la solution UNICA SENSITIVE.
3. Rincer la lentille avec la SOLUTION UNICA SENSITIVE.
4. Placer chaque lentille dans l'alvéole correspondante et remplir l'étui avec la solution UNICA SENSITIVE.
5. Laisser tremper les lentilles dans la solution pendant au moins 4 heures ou toute la nuit pour garantir une décontamination totale.
6. Poser la lentille directement sur les yeux ou avant la pose rincer la lentille avec la SOLUTION UNICA SENSITIVE.
7. Conserver l'étui propre et remplacer la solution tous les jours. Ne jamais utiliser l'eau du robinet pour nettoyer l'étui porte lentilles

Date de la dernière révision: 2009/11

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:

- Ne pas utiliser le flacon au-delà de 90 jours après son ouverture.
- Bien refermer le flacon après usage.
- Ne pas utiliser le produit si le sceau de sécurité est absent ou endommagé.
- Vous pouvez conserver vos lentilles dans la solution, dans l'étui porte lentilles, jusqu'à 30 jours.
- Ne pas avaler la solution. Ranger hors de portée des enfants.
- Conserver à température ambiante.
- Éviter tout contact avec le bec verseur afin d'exclure tout risque de contamination.
- En cas d'irritation oculaire, consulter un spécialiste.
- Avant d'utiliser un médicament ophtalmique, informez votre médecin que vous êtes porteur de lentilles de contact.
- Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants.
- Ne jamais utiliser de l'eau du robinet pour rincer l'étui.
- Ne pas utiliser après la date de péremption.
- Renouveler la solution dans l'étui porte-lentilles après chaque usage.

#### COMPOSITION:

Hyaluronate de Sodium, Poloxamère, EDTA, Polyhexanide 0,0001%, dans une solution stérile, isotonique et tamponnée.