

Posez et retirez votre lentille sclérale avec la ventouse SL



Placez la ventouse sur la lumière de votre téléphone puis posez la lentille sclérale sur la ventouse.



Placez votre lentille sclérale sur la ventouse en la maintenant entre le pouce et l'index

Utilisez votre majeur ou annulaire pour écarter la paupière inférieure et votre autre main pour écarter la paupière supérieure en les maintenant à la base des cils pour éviter tout clignement.

Approchez la lentille de votre oeil et posez-la délicatement sur la cornée. Pressez la ventouse de pose pour libérer la lentille. Lâchez doucement les paupières et clignez plusieurs fois pour évacuer l'excès de larmes.



Maintenez la ventouse SL entre le pouce et l'index et regardez-vous dans le miroir. Positionnez votre majeur juste en dessous du bord libre de la paupière inférieure et l'index de l'autre main sur le bord libre de la paupière supérieure. Placez la ventouse sur le bord inférieur de la partie souple et soulevez la.

Ventousez la lentille dans la partie basse de la lentille et tirez la délicatement vers le haut. La lentille perd son adhésion, d'abord par le bas, puis toute la lentille se libérera d'elle-même. Vous pouvez maintenant la réceptionner avec votre pouce et index.

- Bénéfice attendu : Faciliter la manipulation lors de la pose et du retrait
- Contreindications : Ne pas utiliser pour les lentilles Hybrides, LRPG, Orthokératologie, Souples
- Effets indésirables : Risque d'infection possible en cas de mauvais entretien des accessoires de manipulation

